








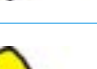

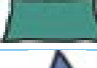


		art.nr	överdrag bomull	vuxen	barn	kirurgi OP bordet	beskrivning
Inga bomullsöverdrag. Rengöring med vanligt rengöringsmedel. Desinfektion med sprit.		7301P	nej	•	•	•	Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med framdragna snibbar
		7101P	nej	•	•	•	Ostbågen är ett större alternativ till halvmånen. Placeras i nacken för den som behöver mer stöd för nacke och huvud
		7201P	nej	•		•	Huvudkudden placeras under huvudet vid liggande på operationsbordet. Används också i behandlingsstolen för patienter med starkt framåtböjd nacke-hals.
		7401P	nej	•		•	Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skuldror och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att till sist läggas över magen. Underarmar och händer placeras ovanpå kudden.
		7421P	nej		•	•	Omgärdaren för barn placeras under nacken, skuldror och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att till sist läggas över magen. Underarmar och händer placeras ovanpå kudden.
		7601	7603	•		•	Benavläpparen för vuxna är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Benen vilar i en uppdragen böjd och utåtförd ställning.
		7621	7623		•	•	Benavläpparen för barn är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Benen vilar i en uppdragen böjd och utåtförd ställning.
		7606		•	•		Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i benavläpparen.
		7821	7823	•	•		Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde och en tunn ryggdyna. Barnet flyttas framåt och uppåt i sitsen. Sittkudden ballanserar bäckenet och fördelar trycket från kroppen lika över hela sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och fyller ut eventuell snedställning eller osymetri och hela ryggen får jämnt fördelat stöd.
		7501	7503			•	Fyrkantkudden placeras under fötterna vid liggande ställning på OP bord.
		7701	7703	•			Underbenskudden för vuxna stöder vader och fötter utan att ge "avstamp".
		510-10		•	•	•	TUMLE lådan förvarar kuddarna när de ej är i användning. Rullas på hjul och flyttas lätt mellan olika behandlingsrum.

CE deklARATION

Tumle dentalkuddar består av ett vattentätt kuddvar med fyllning av polystyrenkulor samt för vissa kuddar ett bomullsöverdrag.

Fyllningen kan skada tvättmaskin eller torktumlare om kulor kommer fria.

Vid behov torkas kudden av med vanligt förekommande rengöringsmedel utan att sänkas i vatten. Kemiska rengöringsmedel får ej användas. För desinfektion använd sprit.

Bomullsöverdrag tvättas vid 60 grader med tvättmedel för kulörtvätt. Överdrag i olika färger tvättas separat. Torktumla vid måttlig värme.

Fyllningen av polystyrenkulor är självslocknande. Kuddvaret i polyuretanbelagd polyester och överdrag i 100% bomull är inte självslocknande.

Undvik skarpa kanter och föremål emot kudden.

Tillse att andningsvägarna inte blockeras av kudden.

Trots hög komfort och maximal tryckfördening är TUMLE dentalkuddar ingen antidecubitus produkt.

TUMLE dentalkuddar kan deponeras som vanligt hushållsavfall.

URI-FORM

URI-FORM BUTIKEN. Timmermansgatan 37. 118 55 Stockholm. Tel. 08-6402955. Fax 08-6402957.
URI-FORM DESIGNS. 118 47 Stockholm. Tel & Fax 08-7029774. Mobil 070-6621114.
www.uriformdesigns.se. e-post: info@uriformdesigns.se

TUMLE

dentalkuddar



TUMLE dentalkuddar äre en serie kuddar som utvecklats i samarbete mellan URI-FORM och Mun-H-Center vid Odontologen i Göteborg. Kuddarna är utformade för att ge patienten stöd och trygghet. Det finns olika kuddar för stöd under huvud och nacke, under skuldror och armar, under knän, ben och fötter. Kuddarna används var för sig eller i kombination med varandra.



För att uppnå en bra kroppsställning i en behandlingsstol behöver patienten sitta med avspänd och väl understödd kropp. Leder och muskler bör befinna sig i viloläge. Många personer med funktionshinder har problem med detta, exempelvis patienter med neurologiska sjukdomar, reumatiska besvär och psykiska tillstånd. För en spastisk person är det viktigt att påverka muskelspänningen genom att armarna hamnar i mjuk böjning framför kroppen. I höfterna behöver benen böjas rejält och föras isär för att kroppen skall uppnå en avslappnad position.

URI-FORM

barntandvård



För ett barn fyller TUMLE dentalkuddar ut behandlingsstolen så att den passar bättre i storlek. Kuddarna är också mysiga att se på och att vara i. För barn med rörelsehinder hjälper kuddarna till att hålla balansen och finna stöd. Anhörig eller assistent behöver inte sitta med barnet i knät. Behandlingen kan utföras tryggt i behandlingsstolen i stället för i en rullstol.

Ett set kuddar för barn består en sittkudde, två kuddar för stöd av huvudet, omgärdaren, benavslapparen och ett fästband. Sittkudden, som också ger stöd längs hela ryggen upp till skulderna, lyfter barnet i stolen till rätt höjd för behandling. Omgärdaren placeras under nacken, skuldror och armar och kopplas samman över magen. Kudden håller om barnet som ett par armar. Beroende på barn och situation finns en liten halvmåne eller större ostbåge som alternativa stöd under huvudet och i nacken. Benavslapparen med sin T-formade ovalsida placeras under knävecken och emellan knäna. Kudden förs så högt upp att höftvinkeln böjes 90 grader. Underben och fötter vilar mot den långa kudden.

URI-FORM

käkkirurgi



Huvudkudden



Omgärdaren



Benavslapparen



Fyrkantkudden



Under operation anpassar TUMLE dentalkuddar operationsbordet till ett bekvämt stöd för patienten. Huvudkudden positionerar huvudet stabilt och vilsamt under hela ingreppet. Kuddarna som användes vid behandling på ett operationsbord är huvudstöd, omgärdare, benavslapparen och en fyrkantkudde.

Operationsbordet upplevs som smalt och hårt. Patienter med balansproblem, rörelsehinder, utpräglad svankrygg eller med värk i muskler och leder, har ofta svårighet att känna trygghet och ligga avslappnat under ingreppet. Tumle dentalkuddar breddar operationsbordet under axlar och armar. Omgärdaren fångar in skuldror, armar och händer och patienten kan koppla bort oron över att tappa armar och händer utanför bordet. Benavslapparen lyfter knäna till lämplig höjd för att låta hela svanken stödja mot bordet. Underben, fötter och hälar vilar stabilt i fyrkantkudden. Huvudstödet är en kilformad och formsydd kudde som stöder huvudet likt en äggkopp stöder ett ägg. Huvudkuddens fyllnadsmaterial, liksom för övriga TUMLE dentalkuddar, formar sig omedelbart efter brukaren och underlaget. Den hakar fast och glider inte undan och håller huvudet på plats under hela ingreppet.

URI-FORM