



### Produktbeskrivning

TUMLE vagnen tillåter positionering och transport i vilolägen för svårt funktionshindrade barn och vuxna. Vagnen användes inom- och utomhus och kan anpassas i mått och funktion för både brukare och vårdare. Rätt arbets höjd i varje moment är lätt att ställa in. Brukaren placeras utan tunga lyft i lämplig höjd inför överflyttning till säng eller rullstol. Högsta arbets höjd över golv är cirka 85 cm. Lyftkapaciteten är 120 kg. Höjdställningen sker elektriskt och manövreringen kontrolleras från en handkontroll.

Underredet har två större bakhjul med trumbromsar och två mindre obromsade länkhjul fram. Bromsen har två funktioner, färd broms och parkeringsbroms. Bromsen aktiveras från ett bromshandtag på körhandtaget. Bromshandtaget tillåter att bromsen manövreras utan att greppet om körhandtaget förloras. Vid transport i kuperad terräng kan vagnen bromsas i utförslut och parkeras för vila i motlut. Monteras körhandtaget bort ryms TUMLE vagnen i en större familjekombi.

TUMLE vagnens övre del är formad som en korg i vilken TUMLE båten passar. Korgen går att förlänga 250 mm i två steg. Den är delad i en ryggdel och en bendel. Ryggdelen kan vinklas 45 grader. Det sker elektriskt från samma handkontroll som reglerar sitt höjden. Bendelen kan vinklas manuellt 18 grader i tre steg. Underben och fötter vilar på ett underbensstöd. Stödet går att justera elektriskt i vinkel mot korgen. Detta sker från handkontrollen. Stödet kan ställas in för rätt underbenslängd och är också möjligt att koppla loss. Körhandtaget kan ställas in i två alternativa höjder. Säkerhetsbandet används alltid med en brukare i TUMLE vagnen.

TUMLE vagnen är konstruerad för att användas tillsammans med TUMLE kuddar med TUMLE båten som underlag för kuddarna. TUMLE kuddar är extremt lätta och formar sig efter brukaren och TUMLE båten. De hakar fast i varandra och glider inte undan som vanliga kuddar. Kuddarna är okänsliga för väta och har ett överdrag i bomull som tvättas i maskin. TUMLE båten och kuddarna presenteras i en separat broschyr.

### Mått & vikt

art.nr. 6900 avser komplett vagn exklusive TUMLE kuddar ( se separat broschyr )  
 längd utan fotstöd 1360 - 1610 mm ( 1130 - 1380 mm utan körhandtag )  
 längd med fotstöd +450 mm  
 bredd 685 mm  
 vikt 61kg  
 korgens längd vid korgens botten 1020 - 1270 mm (inställbar i 3 steg)  
 korgens bredd vid korgens botten 590 mm  
 underbensstödet mått invändigt Dj 370 x B 450 mm  
 underbenstödet kan vinkelinställas + 3° till -30°  
 underbenstödet inställbart 100 mm nedåt  
 maximal vikt brukare 120 kg  
 bakhjul med trumbroms Ø 300 x 42 mm polyuretan  
 avstånd mellan fram- och bakhjul (hjulbas) 630 mm mellan hjulinfästningar  
 framhjul länkhjul Ø 200 x 45 mm polyuretan  
 korgens högsta höjd över golv 650 mm ( med TUMLE båten + ca. 10 cm )  
 korgens lägsta höjd 415 mm ( med TUMLE båten + ca. 10 cm )  
 handtagshöjd 860 alt. 960 mm  
 maximal ryggstödslutning 43°  
 framkant sitsen kan vinklas 18° via 3 lägen med intervall 6°.  
 elektrisk manövrering från LINAK



EN 12182  
 Test genomförd vid Hjaelpemiddel-institutttet Danmark

**URIFORM**

URI-FORM BUTIKEN, Timmermansgatan 38, 118 55 Stockholm. Tel. 08-6402955. Fax 08-6402957.  
 URI-FORM AB, 118 47 Stockholm. Tel & Fax 08-7029774. Mobil 070-6621114.  
 www.uriform.se. e-post: butiken@uriform.se

# TUMLE

## vagnen 6900



**positionering vila transport**

**URIFORM**



## Behovet

Svårt funktionshindrade personer har svårt att finna vila och avspänning. Att sitta större delen av dagen i ett figuranpassat sittskäl är påfrestande då sittställningen med nödvändighet blir tvingande. Sittskalet erbjuder små eller inga möjligheter till ett varierat sittande och det är därför viktigt att få komma ur sittskalet regelbundet och ge kroppen tillfälle att sträcka ut och koppla av. Platsen för avkoppling blir ofta i en säng eller på en gymnastikmatta. Att vila ut tillsammans med vänner eller anhöriga blir sällan av, då "alla andra" ofta är på ställen där sängen inte passar in, t.ex. i köket, framför TV:n eller ute på altanen.



## Möjligheter

TUMLE vagnen vänder sig till svårt funktionshindrade barn, vuxna och äldre. En mobil fätölj och minibädd med näst intill obegränsad möjlighet att anpassas efter var brukares behov. Här är platsen att koppla av efter en dag i skolan eller på jobbet. I högsta läge vilar brukaren på ögonhöjd med stående, medan den lägsta höjden gör TUMLE vagnen till en bekväm TV fätölj. Förflyttning från rum till rum är enkel och säker. Det går också bra att ta med TUMLE vagnen på promenad. Sköna somrardagar kan man vistas utomhus längre perioder. Och vagnen passar i bagaget på en större kombibil.

TUMLE vagnen 6900



## Arbetsredskapet

Vården i TUMLE vagnen är ofta tung. Vårdscheman, blöjbyten och överflyttning mellan säng, duschvagn och rullstol är ständigt återkommande uppgifter som ställer höga krav på god ergonomisk arbetsställning. Rätt arbetshöjd är ett måste för att undvika belastningsskador och i TUMLE vagnen anpassas arbetshöjden till var situation med hjälp av elektrisk manövreringen.

Bilderna på detta uppslag visar brukare av TUMLE vagnen i tidigare versioner. De förändringar som löpande gjorts i vagnens tekniska konstruktion har inte påverkat möjligheten att positionera brukaren annorlunda än vad bilderna visar. Broschyren beskriver därför på ett rättvisande sätt hur positionering i TUMLE vagnen 6900 kan genomföras.

URIFORM

URIFORM